

Protocole : Extraction

Conseils d'utilisation

Selon les indications du Dr. Gagnot (6):


- L'insert doit être activé avant son insertion dans le desmodonte.
- L'insert doit être placé parallèlement à la racine.
- Réaliser un mouvement de va-et-vient en direction apicale.
- Il est important de ne pas faire effet de levier avec les inserts.

60-80
Irrigation ml/min



Schémas réalisés avec l'aide du Dr. G.Gagnot

Récapitulatif **TEZOTOME**

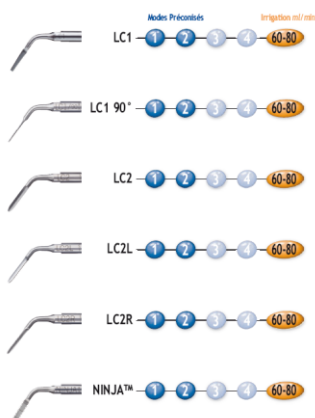

Récapitulatif **TEZOTOME**

